

SV



NÄSDUSCH

2,1 % HYPERTON COLD



Avsväller
& återfuktar.



Aloe vera
& kamomill



Naturligt svenskt
havsvatten.

Havsvattenlösning med en salthalt på 2,1% som har en avsvällande effekt vid förkylningar.

Rengör övre luftvägarna från allergener, irriteringsämnen och bakterier.

ÅLDER 2 +

100 ml

- Nasasol Näsdusch är en icke beroendeframkallande näsdusch utan konserveringsmedel som används för att återfukta och rensa nässlemhinnan/näsborrarna.
- Den kan användas när näspassagen är blockerad av slem eller annat, som blod eller skorpor. Den bidrar till att rensa slemhinnan i näsan från irriterande partiklar som damm, pollen, olika allergener med mera.
- Näsduschen kan även användas för att rensa nashålan och nässlemhinnan före användning av medicinska produkter. Kan användas så ofta det behövs.
- Icke beroendeframkallande och utan konserveringsmedel. Säker och skonsam för långvarigt bruk.
- Innehåller mineraler och spårämnen. Tillsats av aloe vera och kamomill för att ge en behagligare rengöring vad gäller känsla, lukt och smak.

AVSEDD ANVÄNDNING


- För att rensa och återfukta nässlemhinnan/nashålan

MÅLGRUPP

- Kan användas på barn (från 2 år) och vuxna.
- Lämplig vid olika medicinska tillstånd – Kan användas vid allergier, akuta och kroniska luftvägsinfektioner, samt efter näskirurgi.

BRUKSANVISNING

Håll flaskan i valfri vinkel och för försiktigt in munstycket i varje näsborre, tryck 1-2 sekunder. Rengör munstycket i tvålatten och skölj med varmt vatten efter varje användning. Förvara i rumstemperatur för bekväm användning.

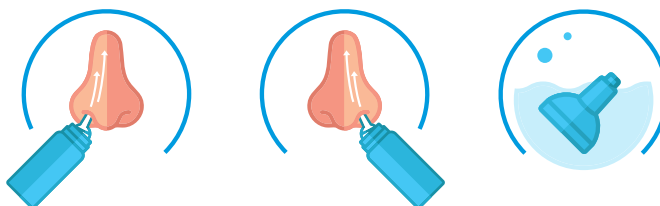

SAMMANSÄTTNING

Havsvattenlösning (2,1 % NaCl), Aloe Vera och Kamomill.

FÖRVARING

Förvaras mellan 0°C och 30°C.
Transporttemperatur -20°C till 40°C.

AVFALLSHANTERING

Följ lokala föreskrifter för säker kassering av trycksatta behållare.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Användning av denna produkt, av mer än en person, kan sprida infektioner.
- Sök läkarvård om tillståndet kvarstår eller förvärras.
- Om någon allvarig händelse inträffar i samband med produkten, rapportera till den lokala behöriga myndigheten och tillverkaren.

KONTRAIKATION

Använd inte om du är överkänslig/allergisk mot Aloe Vera eller växter i familjen Asteracea.

VARNING

- Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
- Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.
- Skyddas från solljus.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

Aurena Laboratories AB
Fjärnviksvägen 22,
SE-653 50 Karlstad,
Sverige

Nordic Lab AB
Box 7324
187 14 Täby
Sverige

(01)07332343301104



2862

3

STERILE R

REF

2011-4

LOT

(10)

Lotnummer och utgångsdatum finns på flaskans/förpackningens undersida.

V1. 2025-05-14AP

MD

T75

(17)

no



NESESPRAY

2,1 % HYPERTON COLD



Demper
& fukter.



Aloe vera
& kamille



Naturlig svensk
sjøvann.

Sjøvannsløsning med en saltkonsentrasjon på 2,1 %, som har en dekongestiv effekt ved forkjølelse.

Renser de øvre luftveiene fra allergener, irritanter og bakterier.

ALDER 2 +

100 ml

- Nasasol neseppray er en ikke-vanedannende, konserveringsfri neseppray som er beregnet for å rense og fukte neseslimhinnen/nesehulen.
- Den brukes når nesepassasjen er blokkert av neseseekret eller av annet materiale, som blodklumper eller skorper. Den bidrar til å rense neseslimhinnen for partikler som støv eller pollen, samt allergener og irriterende stoffer.
- Sprayen kan brukes til å rense nesehulen og slimhinnene før bruk av medisinske produkter. Kan brukes så ofte det er behov.
- Ikke avhengighetsskapende og uten konserveringsmidler – Trygg og skånsom for langvarig bruk.
- Inneholder mineraler og sporstoffer. Tilsatt aloe vera og kamille for en mer behagelig rengjøring når det gjelder følelse, lukt og smak.

TILSIKTET BRUK

- For å rense og fukte neseslimhinnen/nesehulen.

MÅLGRUPPE:


- Kan brukes på barn (fra 2 år) og voksne.
- Egnet for ulike medisinske tilstander – Kan brukes ved allergier, akutte og kroniske luftveisinfeksjoner og etter neseoperasjoner.

BRUKSANVISNING

Hold flasken i en hvilken som helst vinkel og sett munnstykket forsiktig inn i hvert nesebor, trykk i 1–2 sekunder.

Rengjør munnstykket i såpevann og skyll med varmt vann etter hver bruk.

Oppbevares i romtemperatur for komfortabel bruk.

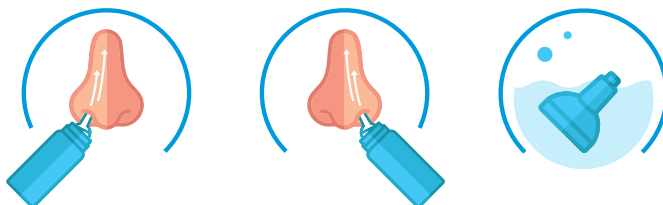

SAMMENSETNING

Sjøvannsløsning (2,1 % NaCl), Aloe Vera og Kamille.

OPPBEVARING

Oppbevares mellom 0°C og 30°C.
Transporttemperatur: -20°C til 40°C.

AVFALLSHÅNDTERING

Følg lokale forskrifter for sikker kassering av trykkbeholdere.

FORSIKTIGHETSREGLER

- Bruk av dette produktet av mer enn én person kan føre til spredning av infeksjoner.
- Kontakt lege dersom tilstanden vedvarer eller forverres.
- Ved alvorlige hendelser knyttet til produktet, rapporter til lokal kompetent myndighet og produsenten.

KONTRAINDIKASJON

Bruk ikke dersom du er overfølsom/allergisk mot Aloe Vera eller planter i Asteraceae-familien.

ADVARSEL

- Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
- Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
- Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F.
- Beskyttes mot sollys.
- Oppbevares utilgjengelig for barn

Aurena Laboratories AB
Fjärnviksvägen 22,
SE-653 50 Karlstad,
Sverige

TMOS Pharma AS
Postboks 126
2451 Rena
Norge

(01)07332343301104



2862

3

STERILE R

REF

2011-4

LOT

(10)

Lotnummer og utløpsdato finner du på undersiden av flaske/emballasjen.

V1. 2025-05-14AP

MD

T75

(17)